

Kopplung zu Byzz (Fa. Orange Dental)

1. Voraussetzungen
2. Erforderliche Einträge in **ivoris**[®]
3. Test Patientenübergabe von **ivoris**[®] **dent**, **ivoris**[®] **ortho** an Byzz
4. Test Patientenübergabe von **ivoris**[®] **analyze** an Byzz
5. Test Bildübernahme in **ivoris**[®] **analyze** über VDDS
6. Fehlermöglichkeiten

1. Voraussetzungen


- **ivoris**[®] und „Byzz“ müssen installiert sein
- das Modul „digital“ muss in **ivoris**[®] freigeschalten sein

2. Erforderliche Einträge in **ivoris**[®]


- es sind keine Einträge erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

3. Test Patientenübergabe von **ivoris**[®] **dent**, **ivoris**[®] **ortho** an „Byzz“

- wählen Sie den Menüpunkt „Kopplungen“ → „VDDS media“
wählen Sie im nächsten Fenster „Byzz“ und bestätigen Sie mit „Ok“

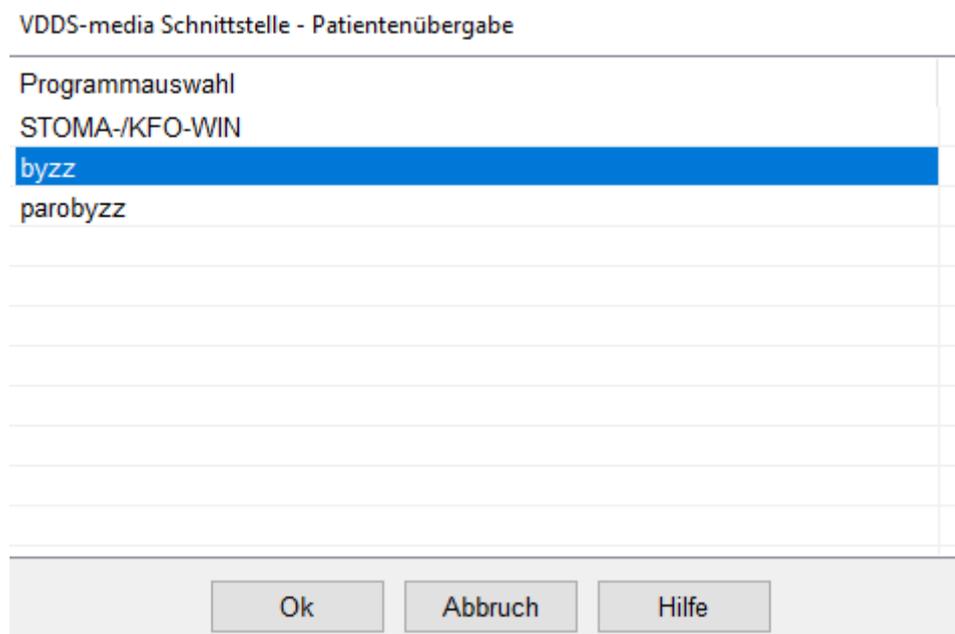

- „Byzz“ wird geöffnet und der Patient angemeldet

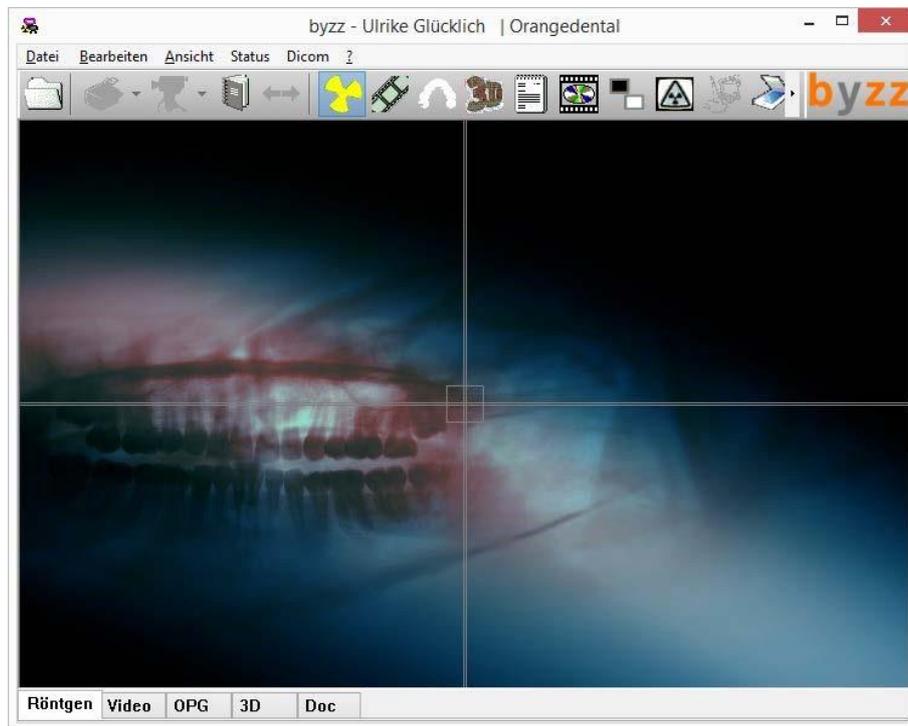

- wurden bei diesem Patienten zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese später hier wieder aufgerufen werden

4. Test Patientenübergabe von ivoris®analyze an „Byzz“

- klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste
- wählen Sie im Reiter „VDDS“ die Datenübergabe an „Byzz“ aus und bestätigen Sie mit „Ok“

Röntgenauftrag/Datenabgleich

VDDS SIDEXIS DIMAXIS DIGORA CLINIVIEW DÜRR TROPHY

Patient

Name: Nummer:

Vorname: geboren:

Daten übergeben an


STOMA-/KFO-WIN
byzz
parobyzz

Hilfe

Abbruch


Ok

- „Byzz“ wird geöffnet und der Patient angemeldet

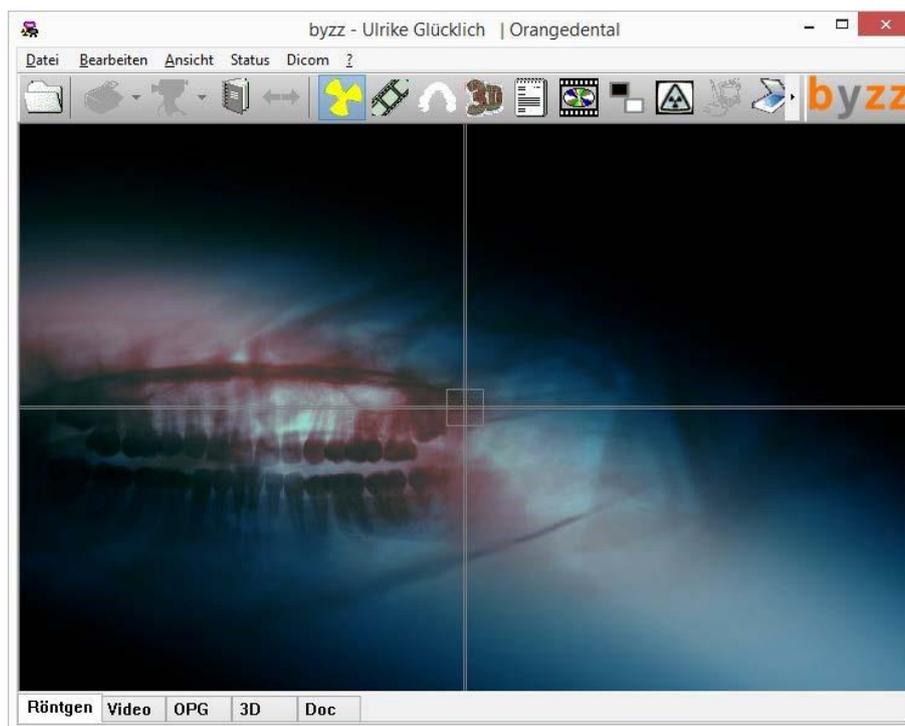


5. Test Bildübernahme von „Byzz“ in ivoris®analyze über „VDDS“

- das Icon „Datenverwaltung“, dort den Ordner „Bildaufnahme“ und auf der rechten Seite den „VDDS-Schalter“ wählen

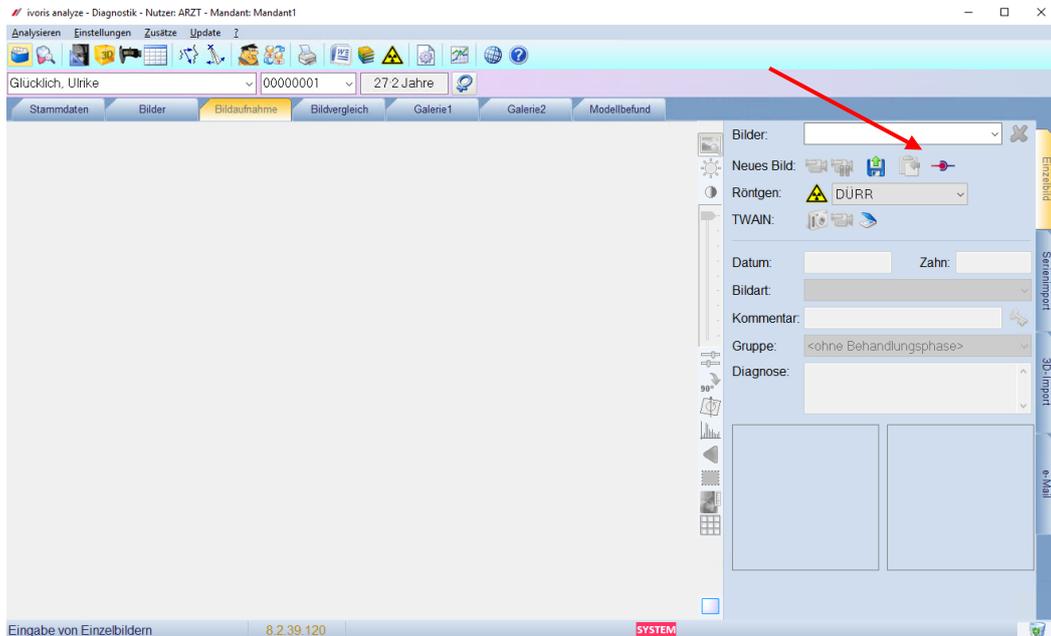

- Bei Klick auf „Byzz“ in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit OK importiert werden

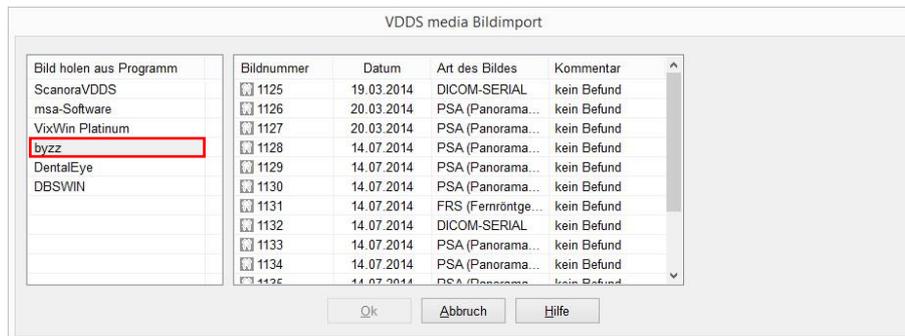

6. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung
Röntgenschalter von <u>ivoris[®]ortho</u> oder <u>ivoris[®]analyze</u> ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung	Modul „digital“ wurde nicht freigeschalten	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
<u>Byzz</u> nicht als VDDS-Client in <u>ivoris[®]analyze</u> verfügbar	ältere Version von <u>ivoris[®]analyze</u> wird verwendet	Update auf <u>fr-win 07.01.000x</u> installieren Update auf <u>ivoris[®]analyze</u> installieren
Bilder werden in der Bilderliste nicht angezeigt – Liste ist leer, obwohl in <u>Byzz</u> Bilder des gewählten Patienten gespeichert sind	Patient würde nicht von <u>von ivoris[®]analyze</u> an <u>Byzz</u> übergeben	Patient noch einmal von <u>ivoris[®]analyze</u> an <u>Byzz</u> übergeben

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG